


Enregistrez votre lecteur pour obtenir de l'aide et du soutien : [OneTouch.ca/fr/bienvenue](http://OneTouch.ca/fr/bienvenue)



## Guide de démarrage rapide

### Système de surveillance de la glycémie OneTouch Verio Flex®

Utilisez ce guide pour apprendre à connaître votre lecteur et suivez les étapes figurant à l'intérieur pour commencer.

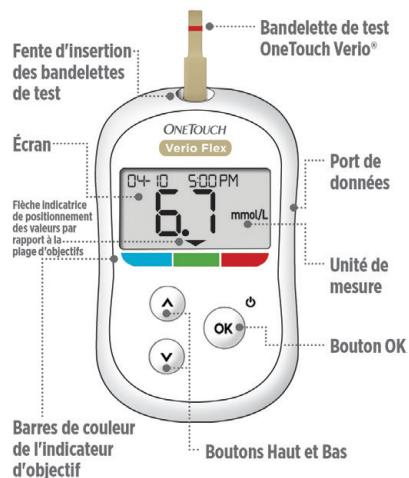

**⚠ IMPORTANT :** Veuillez lire le manuel d'utilisation accompagnant votre système.



AW 06933405A

# 1

## Régler l'heure et la date sur votre lecteur

Allumer le lecteur

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (OK) jusqu'à l'apparition de l'écran de démarrage. Utilisez les boutons (v) (A) pour modifier chaque réglage, puis appuyez sur (OK) pour confirmer.

Régler l'heure sur le premier écran de RÉGLAGES



- > Le segment correspondant à l'heure clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant aux minutes clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant au format AM/PM clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.

Régler la date sur l'écran de RÉGLAGES suivant

- > Le segment correspondant à l'année clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant au mois clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant au jour clignote. Appuyez sur (OK) si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.

Prêt à effectuer un test


Le réglage de votre lecteur est terminé lorsque l'écran avec trois tirets apparaît.

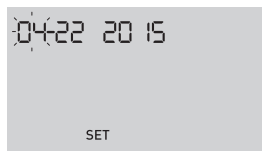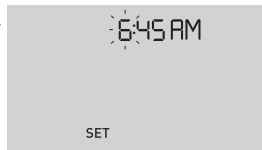


# 2

## Effectuez un test

Broches argentées

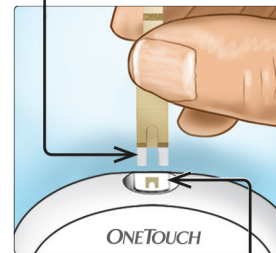



Fente d'insertion des bandelettes de test

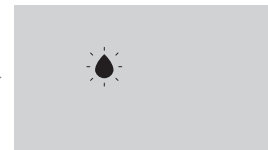

Une goutte de sang clignotante apparaît.

Insérez une bandelette de test (le côté doré de la bandelette et les deux broches argentées face à vous) pour allumer le lecteur.

Canal

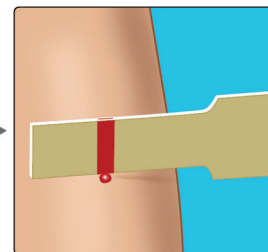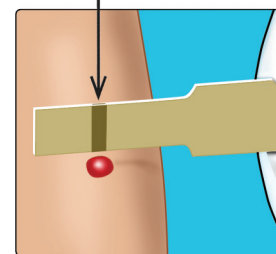


Déposez un échantillon de sang dans le canal, d'un côté ou de l'autre de la bandelette de test. Attendez que le canal se remplisse.

Le canal vire au rouge et le lecteur effectue un décompte de 5 à 1.

3

## Affichez votre mesure

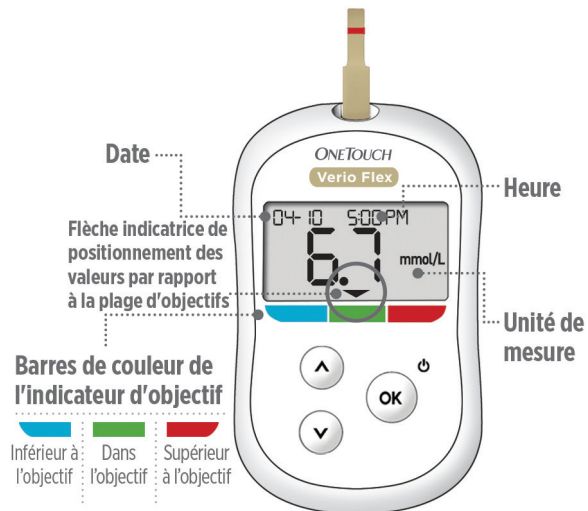


### Exemple d'une mesure dans l'objectif

Votre mesure apparaît à l'écran. La flèche indicatrice de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs pointe vers la barre de couleur bleue, verte ou rouge pour vous indiquer si votre mesure est inférieure, à l'intérieur ou supérieure à vos seuils Hypo et Hyper.



Exemple de mesure inférieure à l'objectif

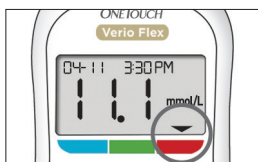

Exemple de mesure supérieure à l'objectif

4


## Facultatif : Se connecter à un dispositif mobile

Votre lecteur est doté de la technologie **Bluetooth®**. Cela vous permet d'envoyer vos mesures, par le réseau sans fil, à votre dispositif mobile (comme un téléphone ou une tablette) sur lequel vous pouvez les consulter et les afficher sous forme de graphiques.


Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de la fonction sans fil de votre lecteur et obtenir une liste complète de dispositifs compatibles et d'applications logicielles, consultez notre site Web au [www.OneTouch.ca/fr](http://www.OneTouch.ca/fr).

### Connexion de votre lecteur

Appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **^** pour activer et désactiver la fonction **Bluetooth®**. Saisissez le NIP indiqué sur votre lecteur dans votre dispositif mobile lorsque ce dernier vous invite à le faire.

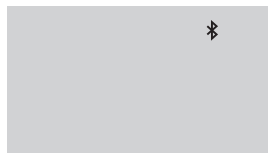

Le symbole **Bluetooth** signifie que la fonction **Bluetooth®** est activée.

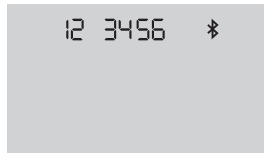

Exemple de NIP.

### Symboles du lecteur


	Alimentation du lecteur		Fonction <b>Bluetooth®</b> activée
	Pile faible		Mode Historique (mesures antérieures)
	Pile vide		Déposer l'échantillon
	Solution de contrôle		Flèche indicatrice de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs
	Synchronisation	<b>SET</b>	Mode Réglages

## À propos de l'indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs

Votre lecteur est doté d'un indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs qui vous indique automatiquement si votre mesure est inférieure, à l'intérieur ou supérieure à votre plage d'objectifs. Les seuils Hypo et Hyper utilisés par l'indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs sont pré-réglés de la façon suivante :



Seuil Hypo pré-réglé

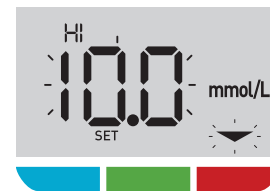

Seuil Hyper pré-réglé

Pour obtenir des détails sur la modification des seuils pré-réglés afin qu'ils correspondent à vos besoins, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Les logos et le mot servant de marque **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par LifeScan Europe. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Communiquiez avec le service à la clientèle OneTouch® au 1-800-663-5521, du lundi au vendredi (de 9 h à 20 h, heure de l'Est ou de 6 h à 17 h, heure du Pacifique), ou visitez le site [www.OneTouch.ca/fr](http://www.OneTouch.ca/fr).

Fabriqué par :  
LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug  
Switzerland

Lecteur fabriqué en Chine  
Consulter le mode d'emploi  
OneTouch®

Date de rév. : 01/2023  
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC  
AW 06953405A

**Lifescan**