



## Stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus

Faites que chaque test soit pratiquement indolore

Vibration† de la lancette réduite de plus de 50 % pour un prélèvement en douceur précis

**MOINS DOULOUREUX** : 8 patients sur 10 étaient d'accord pour affirmer que les tests effectués avec le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus étaient moins douloureux que ceux effectués en utilisant d'autres autopiqueurs\*.




† Vibration de la lancette réduite d'environ 52 % par rapport au stylo autopiqueur OneTouch® Delica®.

\* D'après un sondage mené aux États-Unis en 2018 dans le cadre duquel 103 participants ont essayé les stylos autopiqueurs OneTouch® Delica® et OneTouch® Delica® Plus et ont également formulé des commentaires sur ce qui, selon eux, les distingue de leurs stylos autopiqueurs actuels.

**ONETOUCH®**  
à vos côtés pour avancer<sup>MC</sup>


# Stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus

Peut être utilisé avec les lancettes OneTouch® Delica® Plus  
et les lancettes OneTouch® Delica®

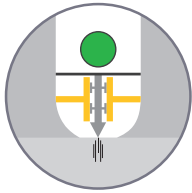

## Technologie de guidage de précision


Vibration† de la lancette réduite pour un prélèvement en douceur précis

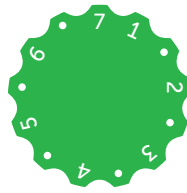

## 13 réglages de la profondeur

Meilleur contrôle pour un confort personnalisé‡

Chaque point affiché entre les chiffres sur la roulette de réglage de la profondeur représente un réglage de profondeur supplémentaire offert.

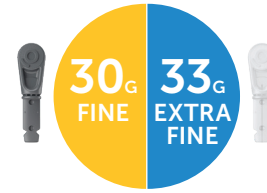

## Des lancettes fines (30G) et extra fines (33G)

recouvertes de silicone qui glissent doucement dans la peau.

## Pour commencer

Avant d'effectuer un test, lavez-vous les mains et lavez le site de prélèvement avec de l'eau tiède et du savon.



1 Retirez l'embout du stylo autopiqueur.



2 Insérez une lancette stérile dans le stylo autopiqueur et retirez le couvercle de protection de la lancette.



3 Remettez en place l'embout du stylo autopiqueur.



4 Réglez la profondeur de piqûre. Les plus petits chiffres sont destinés à des ponctions moins profondes et les chiffres supérieurs à une ponction plus profonde.



5 Pour armer le stylo autopiqueur, ramenez la commande coulissante jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



6 Piquez votre doigt. Maintenez fermement le stylo autopiqueur sur le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur pour effectuer la ponction.



7 Appliquez l'échantillon. Suivez les instructions du manuel d'utilisation de votre lecteur OneTouch® pour appliquer l'échantillon de sang correctement.



Des vidéos de formation sont disponibles sur le site [OneTouch.ca/fr](http://OneTouch.ca/fr).

Consultez dès aujourd'hui votre professionnel de la santé pour en savoir plus au sujet du stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus

† D'après une étude technique sur le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus menée par Asahi en 2018.

‡ Comparativement au stylo autopiqueur OneTouch® Delica®.

Avant d'utiliser le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus pour tester votre glycémie, lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre lecteur OneTouch® et les feuillets d'information accompagnant le système. Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Les marques de commerce sont utilisées sous licence de LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-DPL-2000005