


Pour commencer à utiliser l'application Web OneTouch Reveal®

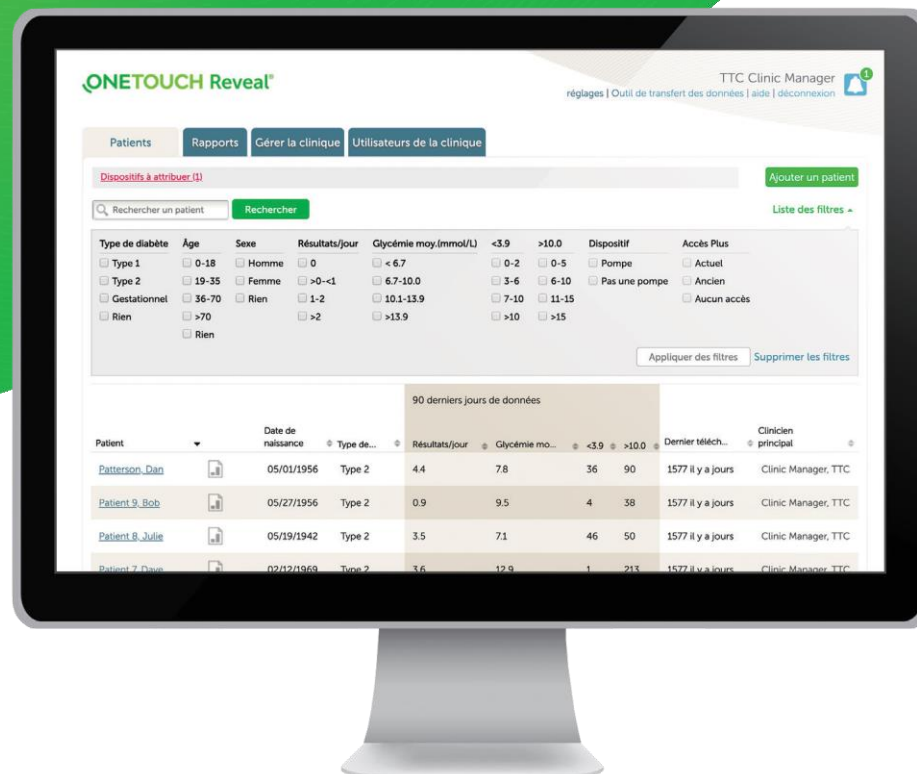


Guide de formation



Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 - 2022 LifeScan IP Holdings, LLC.
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH
à vos côtés pour avancer^{MC}

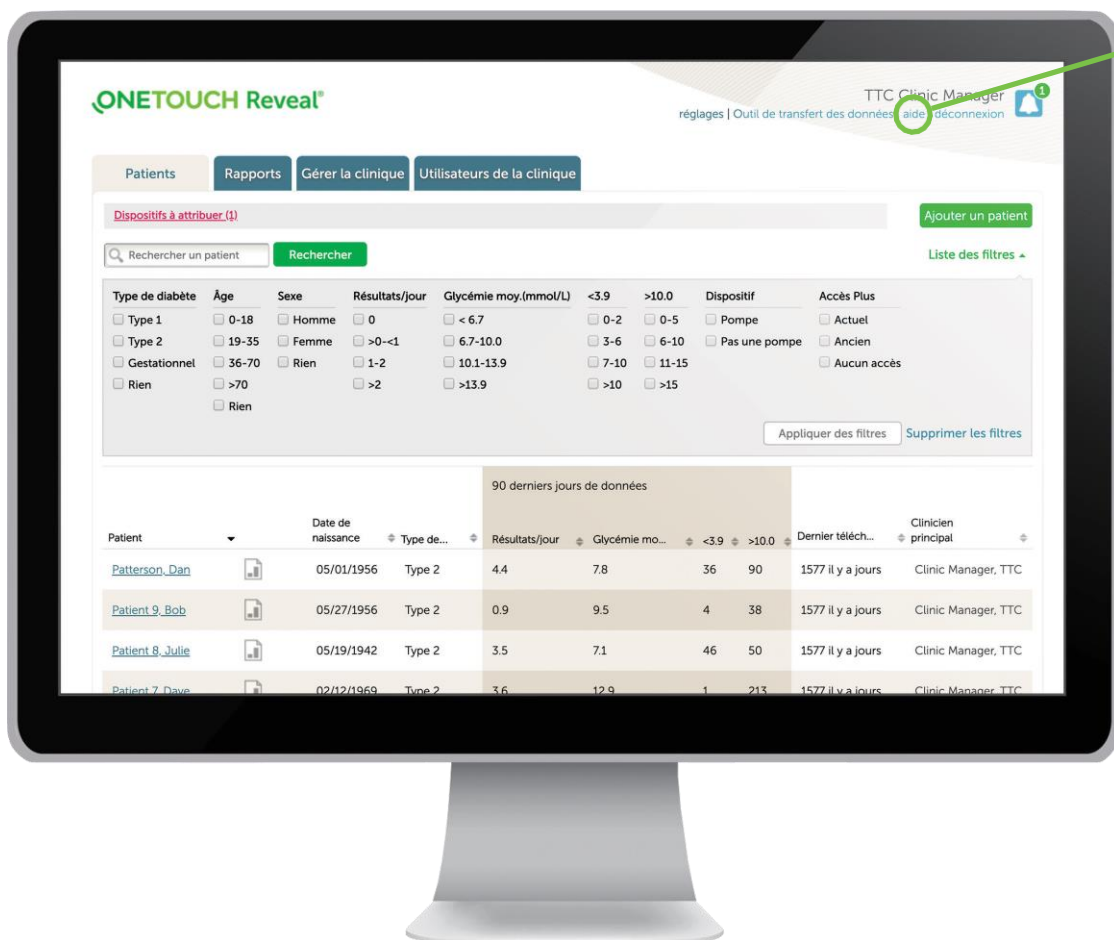

Avant de commencer à utiliser cette application, lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'application Web OneTouch Reveal® destinée aux professionnels de la santé. La version électronique est disponible en cliquant sur **Aide** depuis votre compte de clinique.

L'application Web OneTouch Reveal® classe les utilisateurs dans l'un des trois rôles suivants :

- Patient**
- Utilisateur de la clinique**
- Gestionnaire de la clinique**

L'information est regroupée sous quatre onglets :

- Patients**
- Rapports**
- Gérer la clinique**
- Utilisateurs de la clinique**

Certains onglets ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs.

Ce guide sur l'application Web fournit des instructions sur chacun des onglets et explique comment utiliser le lien Réglages pour définir vos préférences.

Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 - 2022 LifeScan IP Holdings, LLC.
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH[®]
à vos côtés pour avancer[™]

Page de vue d'ensemble des données des patients

Patients : Onglet Patients et écran de navigation principal.

Rapports : Visualisation/impression des rapports.

Gérer la clinique : Cet onglet n'est accessible qu'au gestionnaire de la clinique. Définit les plages d'objectifs de glycémie et les documents à imprimer par défaut pour les pompes et les lecteurs de la clinique.

Utilisateurs de la clinique : Cet onglet n'est accessible qu'au gestionnaire de la clinique. Ajout/modifications des utilisateurs de la clinique.

Nom : Utilisateur actuellement connecté.

Réglages : Pour modifier le profil, les plages d'objectifs, les rapports par défaut de la pompe/du lecteur de l'utilisateur actuellement connecté (et non pour toute la clinique).

Outil de transfert des données : Installation de l'outil de transfert des données (doit être effectuée une seule fois).

Aide : Manuel d'utilisation, coordonnées du service à la clientèle.

Quitter : Ferme la session de l'utilisateur actuel.

ONETOUCH Reveal®

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Dispositifs à attribuer (1)

Rechercher un patient | Rechercher

90 derniers jours de données

Liste des filtres relatifs à la gestion des populations de patients :

Affiche une série de filtres (type de diabète, âge, sexe, etc.) qui permet aux utilisateurs de la clinique de sélectionner les patients qu'ils souhaitent voir afficher ci-dessous.

| | | | Résultats/jour | Glycémie mo... | <3.9 | >10.0 | Dernier téléch... |
|------------------|------------|--------|----------------|----------------|------|-------|-------------------|
| | | | 4.4 | 7.8 | 36 | 90 | 1577 il y a jours |
| | | | 0.9 | 9.5 | 4 | 38 | 1577 il y a jours |
| | | | 3.5 | 7.1 | 46 | 50 | 1577 il y a jours |
| Patient 7_Dave | 02/12/1969 | Type 2 | 3.6 | 12.9 | 1 | 213 | 1577 il y a jours |
| Patient 6_Pete | 01/22/1983 | Type 2 | 3.4 | 12 | | | |
| Patient 5_Brenda | 06/17/1980 | Type 2 | 3.4 | 12 | | | |
| Patient 4_Jack | 03/01/1982 | Type 2 | 2.9 | 8.7 | | | |
| Patient 3_Kate | 05/01/1987 | Type 2 | 5.8 | 8.3 | | | |
| Patient 2_Dan | 04/15/1942 | Type 2 | 4.4 | 7.8 | | | |
| Patient 1_Dora | 02/17/1965 | Type 2 | 1.7 | 11.1 | | | |

Demandes de partage : Affiche toutes les demandes des patients pour partager leurs renseignements avec la clinique. Option pour Confirmer ou Refuser.

Dispositifs à attribuer : Affiche tous les dispositifs qui doivent être attribués (du concentrateur 2net ou de l'outil de transfert des données) à un patient particulier. Option pour Attribuer ou Retirer.

Nom du patient (hyperlien) : Affiche les renseignements sur le patient, les plages d'objectifs et le créneau horaire. Peut également être utilisé pour transférer le patient d'un professionnel de la santé à un autre, ou le retirer complètement.

Visualisation des rapports : Atteint la page des rapports de ce patient (la façon la plus rapide d'accéder aux rapports).

Ouverture de la vue d'ensemble des données du patient : Ouvre l'application Web OneTouch Reveal® destinée aux patients dans une nouvelle fenêtre pour voir exactement ce que le patient voit chez lui, à l'écran de son ordinateur.

Ajouter un patient

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Demandes des patients(1)

* J'ai lu, je comprends et j'accepte la clause d'exclusion de responsabilité ci-dessus.

Ajouter un nouveau patient

Nom de famille: * Prénom: * 2e prénom/initiale: *

Date de naissance: *
3/5/2002

Type de diabète: *
 Type 1
 Type 2
 Gestationnel

Sexe: *
 Homme
 Femme

Adresse électronique
Adresse électronique: * Confirmer l'adresse électronique: *

Or
 Adresse postale
ID du patient: *

Langue
English

Ajouter un patient

Sexe: Homme
ID du patient:
Langue : Français

Imprimer le résumé de l'inscription

S'il s'agit d'un nouveau patient : Cliquez sur le bouton Ajouter un patient dans l'onglet Patients.

· Le **consentement relatif à l'avis de non-responsabilité du professionnel de la santé** s'ouvrira.

· Téléchargez et imprimez le **formulaire de consentement du patient** pour obtenir la signature par le patient.

· Cochez la case « J'ai lu, j'ai compris et j'accepte l'avis de non-responsabilité ci-dessus ».

OU

Accepter une demande de patient : En cliquant sur l'hyperlien Demandes du patient, puis sur Accepter.

Pour ajouter un nouveau patient à l'application Web OneTouch Reveal®, entrez les renseignements suivants :

a. Nom de famille et prénom

b. Date de naissance

c. Type de diabète

d. Sexe

e. Adresse électronique

f. Renseignements facultatifs :

· Identifiant du patient

· Définir les renseignements facultatifs sur le patient

g. Cliquez sur **Ajouter un patient**.

Cliquez sur **Imprimer le résumé** de l'inscription sur la page suivante.

Ouverture du rapport d'un patient

ONETOUCH Reveal[®] TTC Clinic Manager
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Dispositifs à attribuer (1) Ajouter un patient

Rechercher un patient Rechercher Liste des filtres

90 derniers jours de données

| Patient | Date de naissance | Type de... | Résultats/jour | Glycém(mmo... | <3.9 | >10.0 | Dernier téléch... | Clinicien principal |
|--------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|------|-------|-------------------|---------------------|
| Patterson_Dan | 05/01/1956 | Type 2 | 4.4 | 7.8 | 36 | 90 | 1577 il y a jours | Clinic Manager, TTC |
| Patient 4_Jack | 3/1/1982 | Type 2 | 0 | --- | 0 | 0 | 1549 days ago | Clinic Manager, TTC |

Les trois façons de repérer rapidement un patient associé à la clinique :

Compte :

1. Liste des filtres relatifs à la gestion des populations de patients
2. Zone de recherche d'un patient
3. Tri des intitulés par ordre croissant ou décroissant

La façon la plus rapide d'ouvrir les rapports d'un patient : Cliquez sur l'icône de visualisation des rapports.

ONETOUCH Reveal[®] TTC Clinic Manager
réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Rechercher un patient Rechercher

<< premier < précédente 1 2 suivant > dernier >>

| Patient | ID | Date de naissance | Clinicien principal | Dernier téléchargement |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------|
| Patterson_Dan | 5-01-12 | 5/1/1956 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 9_Bob | TTCCAP 9 | 5/27/1956 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 8_Julie | TTCCAP 8 | 5/19/1942 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 7_Dave | TTCCAP7 | 2/12/1969 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 6_Pete | TTCCAP 6 | 1/22/1983 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 5_Brenda | TTCCAP 5 | 6/17/1980 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 4_Jack | TTCCAP 4 | 3/1/1982 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |
| Patient 3_Kate | TTCCAP 3 | 5/1/1987 | Clinic Manager, TTC | 11/10/2015 11:56 am |

Une autre façon d'ouvrir les rapports :

1. Cliquez sur l'onglet Rapports.
2. Cliquez sur le nom du patient.

Remarque : Si vous ne voyez pas le nom du patient, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant la zone de recherche en haut de l'écran.

Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 - 2022 LifeScan IP Holdings, LLC.
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH[®]
à vos côtés pour avancer[™]

Téléchargement et impression des rapports

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | **Rapports** | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Brenda Patient 5
(Date de naissance: 6/17/1980)

Résumé des données du patient de 2/21/2020 à 3/5/2020 Options du rapport

Télécharger le rapport

Dernier téléchargement: 11/10/2015 11:56 am

Les résultats de glycémie que vous avez entrés manuellement dans l'application mobile ne figurent pas dans les rapports générés sur cette application Web.

Avertissement : Les rapports sont destinés uniquement à l'usage de professionnels de la santé ayant une expérience dans le traitement des patients diabétiques.

Tendances

Étape 1: Cliquez sur **Télécharger les rapports** dans l'onglet Rapports.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | **Rapports** | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Brenda Patient 5
(Date de naissance: 6/17/1980)

Résumé des données du patient de 2/21/2020 à 3/5/2020 Options du rapport

Télécharger le rapport

Dernier téléchargement: 11/10/2015 11:56 am

Les résultats de glycémie que vous avez entrés manuellement dans l'application mobile ne figurent pas dans les rapports générés sur cette application Web.

Avertissement : Les rapports sont destinés uniquement à l'usage de professionnels de la santé ayant une expérience dans le traitement des patients diabétiques.

Tendances

Statistiques comparées

| | Plage de dates actuelle | Plage de dates précédente | Variation Δ |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Glycémie (SMBG) | 02/21/2020 - 03/05/2020 | 02/07/2020 - 02/20/2020 | |
| Globale Moy. | 11.6 mmol/L | 9.0 mmol/L | 29.2% \uparrow |
| Écart-type | 6.2 mmol/L | 4.1 mmol/L | 50.1% \uparrow |

Télécharger les rapports

Télécharger ce rapport seulement

Télécharger l'ensemble de rapports préférés pour Brenda Patient 5 :

- Détails par heure du jour
- Résumé des données du patient
- Vue quotidienne intégrée
- Analyse de l'observance
- Détails par jour de la semaine
- Journal
- Analyse des excursions

Pour savoir comment modifier ces réglages, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Fermer

Étape 2a: Pour ne télécharger que le rapport actuel, cliquez sur **Télécharger**.

Étape 2b: Pour télécharger les types de rapports privilégiés (affichés), cliquez sur **Télécharger**.

Remarque: Les types de rapports privilégiés sont définis au départ par le gestionnaire de la clinique, mais les préférences de l'utilisateur de la clinique associées à un patient particulier l'emportent sur ces réglages.

Étape 3: Une fois que vous avez ouvert le fichier PDF, cliquez sur l'onglet **Fichier** et sélectionnez **Imprimer**.

Ajout d'un utilisateur de la clinique ou d'un gestionnaire de la clinique

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager ¹

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | **Utilisateurs de la clinique**

Trouver un utilisateur Rechercher

Gérer les utilisateurs

<< premier < précédente 1 suivant > dernier >>

Ajouter un utilisateur

Seuls **les gestionnaires** de la clinique peuvent ajouter **des utilisateurs** de la clinique :

1. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs de la clinique.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

ONETOUCH Reveal®

TTC Clinic Manager ¹

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | **Utilisateurs de la clinique**

Choisir un utilisateur

Renseignements généraux

Nom de famille *

Prénom*

2e prénom/initiale

Suffixe

Spécialité

Identifiant professionnel

Langue

English

*Obligatoire

Coordonnées

Adresse 1*

Adresse 2

Adresse 3

Ville *

Province *

Alberta

Code postal *

Pays: Canada

Numéro de téléphone principal *

Adresse électronique *

OneTouch Reveal®

Nom d'utilisateur *

Mot de passe *

Votre mot de passe doit comporter de 8 à 16 caractères et inclure au moins une lettre et un chiffre.

Confirmer le mot de passe *

Rôle de l'utilisateur

Cet utilisateur est un gestionnaire de la clinique

Sauvegarder Annuler

Une nouvelle page s'ouvrira :

1. Entrez les renseignements généraux concernant cet utilisateur.
2. Entrez les coordonnées de cet utilisateur.
3. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour cet utilisateur.
4. Cochez la case sous **Rôle de l'utilisateur** si le nouvel utilisateur est un gestionnaire de la clinique.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification des réglages (Imprimer le code de clinique)

Gestionnaires de la clinique

Les gestionnaires de la clinique définissent les réglages par défaut pour la clinique :

1. Cliquez sur l'onglet **Gérer la clinique**.
2. Cliquez sur un sous-onglet (p. ex. Rapports du lecteur).

Cliquez sur **Modifier** dans le coin droit.
Effectuez les modifications.
Cliquez sur **Enregistrer**.

Imprimer le code de clinique :
Il peut être fourni aux patients pour lier leur compte OneTouch Reveal® à votre clinique.

Utilisateurs de la clinique

Les réglages personnalisés par les **utilisateurs de la clinique** l'emportent sur les réglages définis par le gestionnaire de la clinique.

1. Cliquez sur **Réglages**.
2. Cliquez sur un sous-onglet (p. ex. Rapports du lecteur).
3. Cliquez sur **Modifier** dans le coin droit.
4. Effectuez les modifications.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

Objectifs glycémiques

Permet de définir la plage des objectifs glycémiques par défaut pour les types de diabète suivants :

- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Diabète gestationnel

Rapports du lecteur

Permet de définir les réglages par défaut pour les patients qui utilisent un lecteur :

- Rapports imprimés par défaut
- Plage de dates par défaut
- Rapport par défaut affiché à l'écran

Options du rapport

Autres options du rapport :

- Aperçu des résultats de glycémie par heure de la journée dans le rapport Journal.
- Tendances des données de glycémie du patient dans le Résumé des données du patient.
- Présentation des enregistrements de glycémie et d'insuline dans l'ordre où les tests ont été effectués ou de la date enregistrée dans le rapport Liste des données.
- Graphique par heure de la journée des résultats de glycémie, des doses d'insuline et de l'apport en glucides pour une plage de dates donnée.
- Présentation de statistiques telles que les valeurs de glycémie les plus élevées, les plus basses et moyennes par heure de la journée (rapport Détails par heure du jour) ou par jour de la semaine (rapport Détails par jour de la semaine).
- Aperçu du contrôle glycémique de la période considérée actuelle par rapport à la période considérée précédente (progrès du patient) pour une plage de dates donnée (en supposant que les données sont disponibles) dans le Résumé des données du patient.

Modification du profil d'un patient

ONETOUCH Reveal[®] TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Dispositifs à attribuer (1) Ajouter un patient

Rechercher un patient Rechercher Liste des filtres

| Patient | Date de naissance | Type de... | Résultats/jour | Glycémie mo... | <3.9 | >10.0 | Dernier téléch... | Clinicien principal |
|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|------|-------|-------------------|---------------------|
| Patterson, Dan | 05/01/1956 | Type 2 | 4.4 | 7.8 | 36 | 90 | 1577 il y a jours | Clinic Manager, TTC |

1 Cliquez sur le nom du patient pour modifier son profil.

2 Cliquez sur **Dispositifs** pour afficher la liste et sur Modifier (à droite de chaque dispositif) pour modifier le nom du dispositif d'un patient. Cliquez sur Sauvegarder lorsque vous avez terminé.

ONETOUCH Reveal[®] TTC Clinic Manager

réglages | Outil de transfert des données | aide | déconnexion

Patients | Rapports | Gérer la clinique | Utilisateurs de la clinique

Brenda Patient 5 (Date de naissance: 6/17/1980) Profil Dispositifs Liste des patients

Renseignements généraux Modifier

Brenda Patient 5
6/17/1980
Femme
ID: TTCCAP5

Adresse électronique
ttc.ca.patient5@example.org

Coordonnées
Canada

Langue
Langue : Français

Gestion du diabète
Pour gérer mon diabète :
Je surveille mon régime alimentaire et mon activité physique

OneTouch Reveal[®] personnalisera les conseils en fonction de ces renseignements.

Traitement du diabète Modifier

Clinicien principal:
Clinic Manager, TTC

Type de diabète:
Type 2 (par défaut)

Plages d'obj.

| | | | |
|---------------------|------|--------|--------|
| Avant le repas | 4.0 | 7.0 | mmol/L |
| Après le repas | 5.0 | 10.0 | mmol/L |
| Plage globale | 4.0 | 10.0 | mmol/L |
| Hypoglycémie grave | 2.8 | mmol/L | |
| Hyperglycémie grave | 20.0 | mmol/L | |

Insulin Mentor^{MC}

Activer et configurer Insulin Mentor^{MC} pour ce patient. Une fois activé, Insulin Mentor^{MC} sera accessible dans l'application mobile OneTouch Reveal[®] du patient.

Avant de l'activer, assurez-vous que votre patient sait compter les glucides et calculer un bolus d'insuline, et discutez de l'ajustement des paramètres d'Insulin Mentor^{MC} qui répondra le mieux aux besoins et aux capacités de votre patient.

Configurer Insulin Mentor^{MC}

Calendrier des créneaux horaires

| Désignation | Nuit | Avant le déjeu... | Après le déjeu... | Avant le dîner | Après le dîner | Avant le souper | Après le souper | Coucher |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Heure | 12:00 am - 6:00 am | 6:00 am - 9:00 am | 9:00 am - 11:00 am | 11:00 am - 2:00 pm | 2:00 pm - 5:00 pm | 5:00 pm - 7:00 pm | 7:00 pm - 10:00 pm | 10:00 pm - 12:00 am |

Supprimer un patient de la clinique

Supprimer

3 **Modifier** : Cliquez sur l'un des hyperliens **Modifier** pour modifier l'information (Renseignements généraux, Coordonnées, Langue, etc.)

4 Cliquez sur **Configurer Insulin Mentor^{MC}** pour personnaliser les recommandations relatives à la dose d'insuline prandiale pour vos patients.

La fonctionnalité Insulin Mentor^{MC} est destinée à être utilisée par des personnes de 18 ans et plus atteintes de diabète qui doivent prendre des bolus d'insuline. Avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, un médecin ou professionnel de la santé doit activer la fonctionnalité et programmer la configuration des paramètres spécifiques au patient. Les patients quant à eux doivent suivre un tutoriel d'initiation relatif à l'utilisation de la fonctionnalité. Une recommandation posologique précise est établie en fonction des données saisies par le patient dans la fonctionnalité et des paramètres définis par son professionnel de la santé, y compris l'objectif de glycémie du patient, le rapport insuline/glucides, la durée de l'insuline active et la sensibilité à l'insuline.

5 Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer le profil d'un patient.

Pour les professionnels de la santé uniquement

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 - 2022 LifeScan IP Holdings, LLC.
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-WDM-2000012

ONETOUCH[®]
à vos côtés pour avancer^{MC}