

# Chaque lecteur OneTouch® est conçu pour que vous puissiez facilement tester votre glycémie et pour vous aider à prendre en charge votre diabète.

Étape  
**1**

**Insérez** une bandelette de test OneTouch Verio®



Étape  
**2**

**Appliquez le sang** de n'importe quel côté de la bandelette



Test pratiquement indolore

**Et le tour est joué...**

Vos résultats apparaissent à l'écran. Notre technologie ColourSure® vous montre instantanément si vos résultats de glycémie sont **dans l'objectif ou à l'extérieur de l'objectif**



Connectez-vous à l'**appli OneTouch Reveal®** pour obtenir encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu. Voir au verso.

Les décisions de traitement doivent être fondées sur le résultat numérique et la recommandation d'un professionnel de la santé; elles ne doivent pas s'appuyer exclusivement sur la position du résultat par rapport à la plage d'objectifs (seuils Hypo/Hyper).

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 - 2022 LifeScan IP Holdings, LLC. Les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-VRF-2000074

**ONETOUCH®**

# Synchronisation harmonieuse des données de votre lecteur OneTouch® directement dans votre téléphone intelligent. Pour commencer...

## 1. Téléchargez l'appli OneTouch Reveal® GRATUITE

- Visitez la boutique d'applications de votre appareil mobile et cherchez « **OneTouch Reveal** », puis installez l'appli



## 2. Activez la fonction Bluetooth® de votre lecteur OneTouch®

### Si vous utilisez le lecteur OneTouch Verio Reflect® :

- Allumez votre lecteur. Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse
- Allez au menu Réglages > sélectionnez et activez la fonction Bluetooth®

### Si vous utilisez le lecteur OneTouch Verio Flex® :

- Appuyez sur le bouton **OK** pour mettre votre lecteur en marche
- Appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **▲** pour activer la fonction Bluetooth®



Bluetooth®

N'oubliez pas d'activer aussi la fonction Bluetooth® de votre appareil mobile.

## 3. Établissez la connexion

- Activez l'appli OneTouch Reveal® sur votre appareil mobile et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran
- Lorsque l'appli le demandera, entrez le NIP qui s'affiche à l'écran de votre lecteur dans votre appareil mobile et touchez **Jumeler**



Vous pouvez également consulter votre compte à partir de votre ordinateur en allant sur le site [OneTouchReveal.ca](https://www.onetouchreveal.ca)

12 3456

Exemple de NIP

## Vous pouvez maintenant effectuer des tests et synchroniser vos données!

### (Facultatif) Partagez vos données avec votre équipe soignante

- Une fois la configuration terminée, touchez **PLUS** et sélectionnez **Connexions**
- Touchez **Ajouter une clinique** et entrez le **Code de la clinique** que votre équipe soignante vous a remis et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

Entrez le code de la clinique

--	--	--	--	--	--

Pour en savoir plus, consultez le site [OneTouch.ca/fr](https://www.onetouch.ca/fr) ou composez le **1-800-663-5521**.