


Guide de démarrage rapide

Système de surveillance de la glycémie

OneTouch Verio Flex^{MC}

Utilisez ce guide pour apprendre à connaître votre lecteur et suivez les étapes figurant à l'intérieur pour commencer.

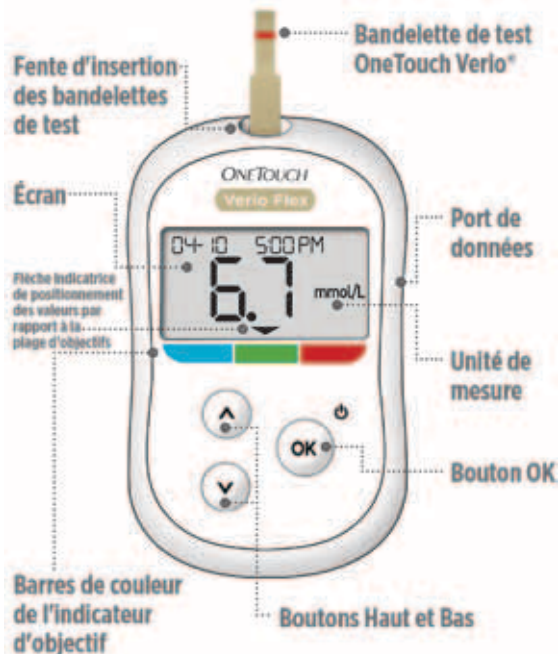

△ IMPORTANT : Veuillez lire le manuel d'utilisation accompagnant votre système.



AW 06933401B

ONETOUCH[®]

1

Régler l'heure et la date sur votre lecteur

Allumer le lecteur


Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'apparition de l'écran de démarrage.

Utilisez les boutons **↓** **↑** pour modifier chaque réglage, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.




Régler l'heure sur le premier écran SET

- > Le segment correspondant à l'heure clignote. Appuyez sur **OK** si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant aux minutes clignote. Appuyez sur **OK** si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.

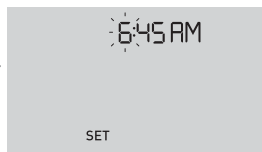


Régler la date sur l'écran SET suivant

- > Le segment correspondant à l'année clignote. Appuyez sur **OK** si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant au mois clignote. Appuyez sur **OK** si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.
- > Le segment correspondant au jour clignote. Appuyez sur **OK** si la valeur est correcte, sinon modifiez la valeur et confirmez.

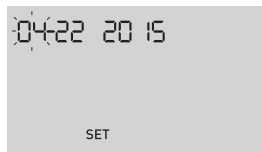

Prêt à effectuer un test

Le réglage de votre lecteur est terminé lorsque l'écran avec trois tirets apparaît.

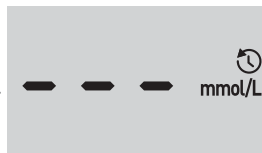

2

Effectuer un test

Broches argentées





Fente d'insertion des bandelettes de test

Insérez une bandelette de test (le côté doré de la bandelette et les deux broches argentées face à vous) pour allumer le lecteur.



Une goutte de sang clignotante apparaît.

Canal

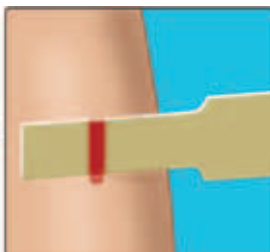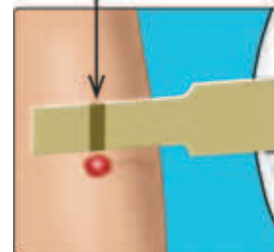


Déposez un échantillon de sang dans le canal, d'un côté ou de l'autre de la bandelette de test. Attendez que le canal se remplisse.

Le canal vire au rouge et le lecteur effectue un décompte de 5 à 1.

3

Afficher votre mesure

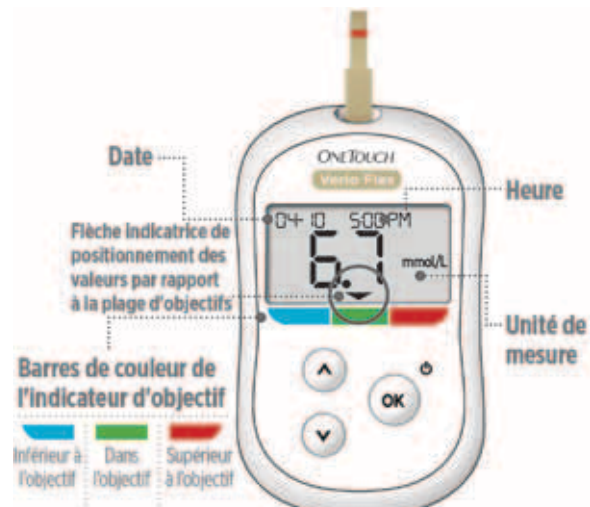

Exemple d'une mesure dans l'objectif

Votre mesure apparaît à l'écran. La flèche indicatrice de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs pointe vers la barre de couleur bleue, verte ou rouge pour vous indiquer si votre mesure est inférieure, à l'intérieur ou supérieure à vos seuils Hypo et Hyper.



Exemple de mesure inférieure à l'objectif



Exemple de mesure supérieure à l'objectif

4

Facultatif : Se connecter à un dispositif mobile

Votre lecteur est doté de la technologie **Bluetooth®** Smart . Cela vous permet d'envoyer vos mesures, par le réseau sans fil, à votre dispositif mobile (comme un téléphone ou une tablette) sur lequel vous pouvez les consulter et les afficher sous forme de graphiques. Pour en apprendre davantage sur l'utilisation de la fonction sans fil de votre lecteur et obtenir une liste complète de dispositifs compatibles et d'applications logicielles, consultez notre site Web au www.OneTouch.ca/fr.

Connexion de votre lecteur

Appuyez simultanément sur les boutons **OK** et **^** pour activer et désactiver la fonction **Bluetooth®**. Saisissez le NIP indiqué sur votre lecteur dans votre dispositif mobile lorsque ce dernier vous invite à le faire.



Le symbole **⌘** signifie que la fonction **Bluetooth®** est activée.



Exemple de NIP.

Symboles du lecteur

	Alimentation du lecteur		Fonction Bluetooth® activée
	Pile faible		Mode Historique (mesures antérieures)
	Pile vide		Déposer l'échantillon
	Solution de contrôle		Flèche indicatrice de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs
	Synchronisation	SET	Mode Réglages

À propos de l'indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs

Votre lecteur est doté d'un indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs qui vous indique automatiquement si votre mesure est inférieure, à l'intérieur ou supérieure à vos seuils Hypo et Hyper. Les seuils Hyper et Hypo utilisés par l'indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs sont pré-réglés de la façon suivante :



Seuil Hypo pré-réglé



Seuil Hyper pré-réglé

Pour obtenir des détails sur la modification des seuils pré-réglés afin qu'ils correspondent à vos besoins, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Le mot servant de marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par LifeScan Scotland Ltd. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



Rev. : 02/2016
© 2015-2016, LifeScan Inc.
AW 06933401B

Fabriqué par :
LifeScan Europe
Division of Cilag
GmbH International
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Appelez la ligne InfoSoins de OneTouch® au 1 800 663-5521, du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h (heure de l'Est), de 6 h à 17 h (heure du Pacifique), ou consultez le site www.OneTouch.ca.

ONETOUCH®

